



LA TECNOLOGÍA QUE ESTA MARCANDO UN ANTES Y UN
DESPUES EN LA REMODELACION CORPORAL



www.casbell.es

957 607 626 - 659 363 539





CYCLONE® es una plataforma multiaplicativa y autosuficiente de última generación que permite dispensar una sesión de tratamiento corporal completa: desfibrosado, liporreducción (lipolisis y lipoclasia), drenaje linfático y reafirmación cutánea. Todo ello permite abordar el tratamiento de pacientes en normopeso o con sobrepeso localizado de una forma simple, no invasiva y sin efectos colaterales y con un enfoque global (atendiendo todo los aspectos periféricos a la pérdida de volumen).



HIFU®




Los ultrasonidos focalizados de alta intensidad (High Intensity Focus Ultrasound) emiten ondas de ultrasonidos focalizados directa y específicamente dirigidas a la célula grasa desintegrando éstas sin afectar a los tejidos adyacentes.

La ventana de emisión de energía de ultrasonidos terapéuticos está focalizada en un punto específico, conocido como punto focal. Esta concentración de energía en un punto creará un daño térmico mecánico en el tejido graso, afectando también una pequeña área alrededor del punto focal.

TRATAMIENTO DE ALTA PRECISIÓN

Solo afecta el tejido diana gracias a su sistema de seguimiento de alta precisión y los distintos elementos de parametraje.

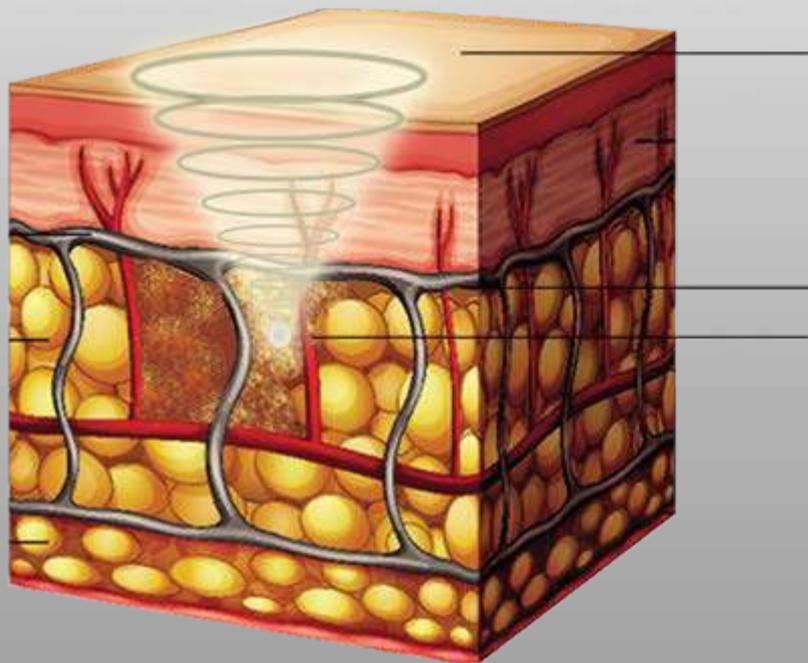

Tejido no afectado por el HIFU®.

Impacto focalizado de los ultrasonidos.



CYCLONE[®]

Una vez destruidos los adipocitos, el mecanismo de curación natural del cuerpo humano se pone en marcha. Los macrófagos actúan en el área dañada eliminando los contenidos celulares, incluyendo las moléculas de grasa. Los lípidos son metabolizados por las vías habituales. Con el paso del tiempo la matriz celular queda destruida y se produce una remodelación con reducción del grosor de la capa grasa. La cantidad de lípidos libres surgidos de este procedimiento está dentro de las capacidades de metabolización de tejido graso por parte del cuerpo humano. De hecho, los índices obtenidos por análisis del contenido graso en sangre después de un tratamiento por el procedimiento HIFU están dentro de la normalidad sin observarse aumentos significativos de los perfiles de FFA, HDL, LDL, triglicéridos o Colesterol total.



Las frecuencias generadas por el sistema HIFU son muy importantes. Las publicaciones muestran que las frecuencias deberían estar entre 200Khz. Este rango ha demostrado ser más eficaz en la destrucción de tejido graso que otras frecuencias más bajas. Esta eficacia se traduce en tratamientos más rápidos.


Los resultados obtenidos en una sola sesión de tratamiento han sido de 2,5 cms. de reducción del contorno de la cintura. Los resultados pueden ser visibles al mes, pero los mejores resultados aparecen a los 2 ó 3 meses después de la sesión. Aunque la mayoría de pacientes responden bien después de una sesión de tratamiento, es posible realizar una nueva sesión hasta conseguir el resultado deseado



La profundidad del HIFU va a depender de la energía dado que la frecuencia no es variable

A un 60% de energía la profundidad será de 0,8 cms.

Entre el 70%-100% la profundidad será de 1,5 cms

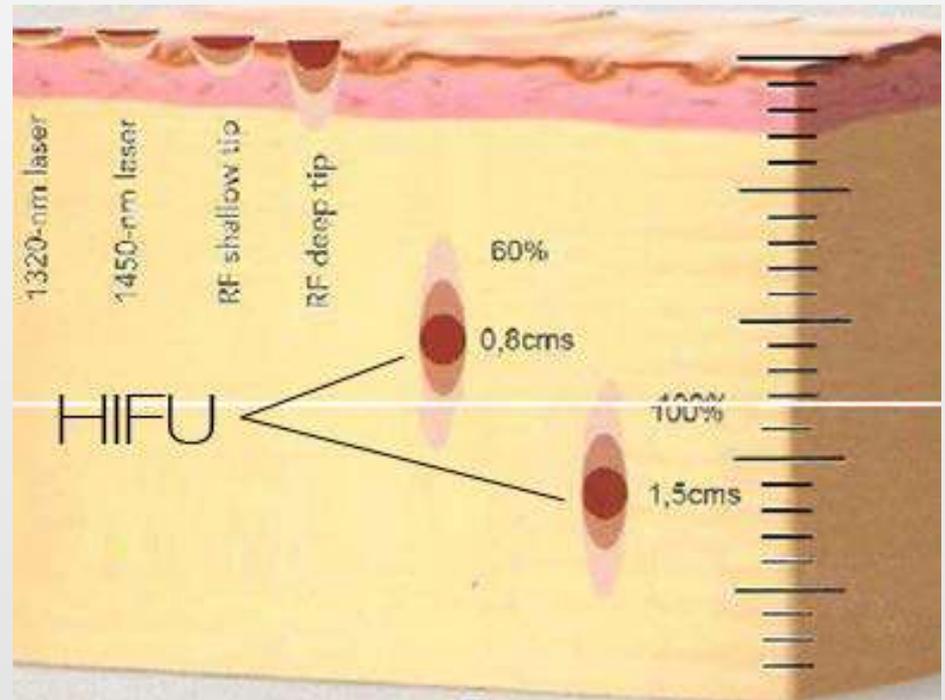

CRS®

El equipo Cyclone dispone de un exclusivo y novedoso sistema denominado C.R.S (Cyclone Rotative System), tecnología patentada por Medikalight, que cuenta con 2 manípulos de distintos tamaños que incorporan vacumterapia, un sistema rotatorio y RF bipolar.



CRS®

- Incremento del aporte sanguíneo
- Incremento de la difusión del oxígeno e intercambio entre los vasos sanguíneos y las células grasas
- Reducción del tamaño de las células adiposas
- Ruptura mecánica de los enlaces de tejido conectivo
- Drenaje del fluido intercelular



CRS®

Para zonas más extensas se ha diseñado un cabezal que incluye las 3 tecnologías permitiendo de esta manera dispensar una sesión de tratamiento completa: desfibrosado, liporreducción, drenaje linfático, reafirmación cutánea, para así no desatender ningún flanco del tratamiento y no dejar nada al azar..




Para zonas reducidas, se ha diseñado un cabezal más pequeño que incorpora vacumtaerapia y RF bipolar.

La radiofrecuencia crea un efecto tensor del tejido debido a la regeneración de colágeno y de las fibras de elastina.



RF Bipolar

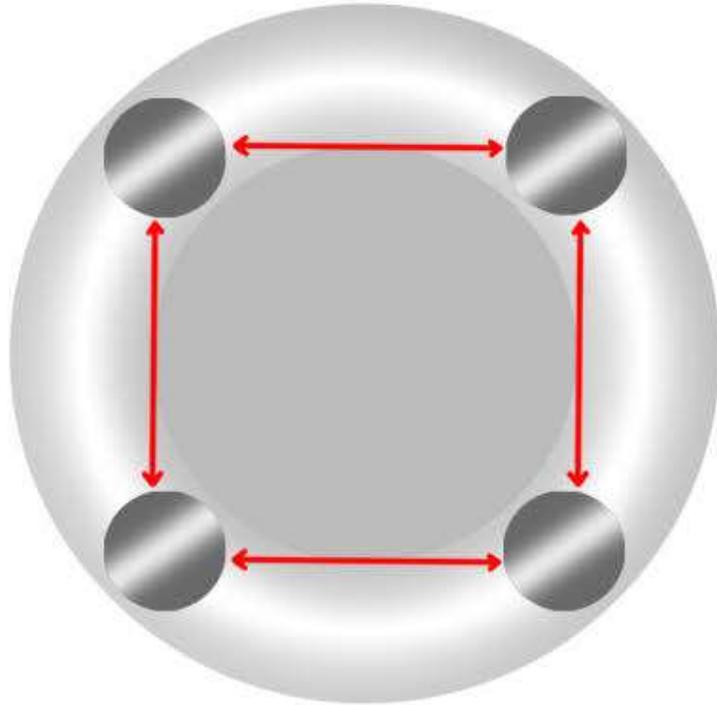

Gracias a la RF Bipolar podemos combatir la flacidez que pueda producir la pérdida de volumen y la acción mecánica sobre la piel y también mejorar el aspecto de la piel.

Rf Bipolar



US + RF

Ultrasonidos cavitacionales + RF monopolar

El efecto de los ultrasonidos cavitacionales es la formación e implosión de microburbujas, liberando un impacto de energía que ayuda a romper glóbulos uniloculares de grasa de adipocitos. Los ultrasonidos están emitidos a una frecuencia de 60 kHz para evitar la conversión de la transmisión ósea en pitido auditivo para aumentar el confort del paciente.

El cabezal emite simultáneamente R.F monopolar para conseguir aumentar la calidad cavitacional y reducir la duración del tratamiento.



RESULTADOS

Paciente nº 1

PESO INICIAL 71.6

PESO FINAL 63.6

BAJADA DE PESO TOTAL 8 kg

GRAN MEJORÍA DEL ASPECTO DE LA PIEL Y DE LA FLACIDEZ

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA PACIENTE: ALTO

EXPECTATIVAS DE LA PACIENTE: SUPERADAS



Paciente nº 2

PESO INICIAL 89

PESO FINAL 62.9

BAJADA DE PESO TOTAL 25kg 100 gr.

GRAN MEJORÍA DEL ASPECTO DE LA PIEL Y DE LA FLACIDEZ

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA PACIENTE: ALTO

EXPECTATIVAS DE LA PACIENTE: SUPERADAS





ANTES
06-02-2013

DESPUES
19-02-2014



1ª FOTO
06-02-2013

2ª FOTO
23-07-2013

3ª FOTO
25-09-2013

4ª FOTO
19-02-2014



CLIPPING DE PRENSA






Ana Rosa
Cyclone - El super reductor
Abril 2015



AR Y COAGONE

El super reductor

La última tecnología en el ámbito de la medicina estética permite reducir la celulitis, la flacidez y la grasa localizada. La última tecnología en el ámbito de la medicina estética permite reducir la celulitis, la flacidez y la grasa localizada. La última tecnología en el ámbito de la medicina estética permite reducir la celulitis, la flacidez y la grasa localizada.

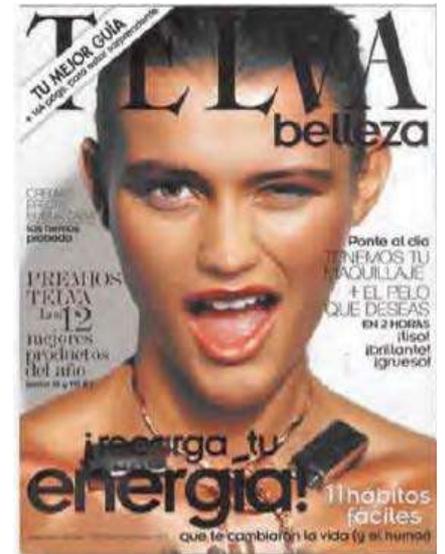

REVISTA DORIS, n.º 15
Mayo 2015

CYCLONE

5 TÉCNICAS; A LA VANGUARDIA EN REMODELACIÓN CORPORAL.

Hasta hace bien poco, era imposible llegar a una cintura de estofa y que te resultara un barrido corporal e facial que olga que no tiene agua, producto y lavatorio expulso de su médico de confianza. Después de eso, el motor del tratamiento sigue siendo las manos del profesional médico y el objeto de nuestra vista es la misma agua cuando el mismo termina con la flacidez, dar vitalidad a nuestro rostro, eliminar arrugas, estrías. Pero la forma de conseguirlo ha ido de un paso de gigante: asistiendo la tecnología al proceso laborioso realizado hasta ahora.

28 JUNIO Y JULIO 2015

¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS ESTÉTICAS Y CÓMO SE USAN?

Las técnicas estéticas se refieren a los procedimientos que se utilizan para mejorar el aspecto físico de una persona. Estas técnicas pueden ser mínimamente invasivas o no invasivas, y se utilizan para tratar una variedad de condiciones, como la celulitis, la flacidez, las arrugas y las estrías.

¿QUÉ SON LAS TÉCNICAS ESTÉTICAS Y CÓMO SE USAN?

Las técnicas estéticas se refieren a los procedimientos que se utilizan para mejorar el aspecto físico de una persona. Estas técnicas pueden ser mínimamente invasivas o no invasivas, y se utilizan para tratar una variedad de condiciones, como la celulitis, la flacidez, las arrugas y las estrías.

28 JUNIO Y JULIO 2015

El tratamiento de la celulitis y la flacidez es un proceso que requiere de un enfoque integral. Este enfoque incluye el uso de tecnología avanzada para tratar la celulitis y la flacidez, así como el uso de productos de cuidado de la piel para mejorar el aspecto de la piel.

CLINIQUE

El tratamiento de la celulitis y la flacidez es un proceso que requiere de un enfoque integral. Este enfoque incluye el uso de tecnología avanzada para tratar la celulitis y la flacidez, así como el uso de productos de cuidado de la piel para mejorar el aspecto de la piel.

CLINIQUE

El tratamiento de la celulitis y la flacidez es un proceso que requiere de un enfoque integral. Este enfoque incluye el uso de tecnología avanzada para tratar la celulitis y la flacidez, así como el uso de productos de cuidado de la piel para mejorar el aspecto de la piel.

TELVA 2015

El premio TELVA 2015 es el reconocimiento a los mejores productos de belleza del año. Este premio es otorgado por un jurado de expertos en belleza y es considerado uno de los premios más prestigiosos del sector.

CLINIQUE

El premio TELVA 2015 es el reconocimiento a los mejores productos de belleza del año. Este premio es otorgado por un jurado de expertos en belleza y es considerado uno de los premios más prestigiosos del sector.

CLINIQUE

El premio TELVA 2015 es el reconocimiento a los mejores productos de belleza del año. Este premio es otorgado por un jurado de expertos en belleza y es considerado uno de los premios más prestigiosos del sector.



Paula Echevarría combate las arrugas con el Cyclone

La naturaleza fue muy generosa con ella, pero la actriz pone también de su parte. Es adicta a los cosméticos y prueba todos los tratamientos de belleza.

Esperanza Jiménez - 19/11/2015

 0
  Me gusta 170
  twittear
  imprimir
  enviar



26 de mayo de 2015

Tendencias Primavera Verano 2015

Parece que por fin llega el buen tiempo, aunque no sé si me atrevo a hacer el **cambio de armario** después de 9 meses embarazada, con la **ropa de premadra** pero muy feliz con mis niños!! Me apetece estar el máximo tiempo posible con ellos pero también recuperar cuanto antes mi figura y actualizar el armario con algunas de las tendencias que os voy a contar.

Hay que tener en cuenta que aunque predominen una serie de **tendencias**, no todo el mundo tenemos el mismo cuerpo ni podemos permitirnos llevar las mismas cosas. Hay que **conocer nuestro cuerpo**, llevar lo que más nos favorezca y aceptar que hay cosas que no nos podemos poner.

Aquí algunas de las tendencias clave para esta **primavera verano 2015** y consejos para lucirlas de la mejor manera posible.

La culpa no la tuvo el otro día ella, sino mi madre. A ella, a Maribel Yébenes, le debo igual junto a mi hermana Lucía un bote de cremas que me enseñara todos los secretos de belleza. Mi cara, mis pechos y mi cuerpo se estarán siempre agradecidos. Aquí os traigo todos sus trucos, consejos y secretos para estar guapas en un clic.



Cyclone, perderás hasta cuatro centímetros por sesión

Escrito el 14/01/2015 12:10:49 en Noticias

¿Quieres comentar esta noticia?

0 mensajes

Comentar

Twitter

33

Me gusta

Imprimir

Enviar a un amigo

¿Tienes una buena noticia? Te pagamos por ella



¿Aún no conoces este tratamiento estrella del centro de belleza Patricia Moreno de Montecarmelo? Ahora puedes hacerlo, y comprobar por ti mismo sus milagrosos resultados con esta exclusiva promoción durante el mes de enero. ¡No pierdas esta oportunidad!

Que mejor manera de comenzar el año que con este programa especial para reducir volumen que incluye la modalidad de 6 sesiones de Cyclone + 6 Proserotraplas; o 12 sesiones de Cyclone + 6 Proserotraplas.

Y es que con este sistema se pueden perder hasta cuatro centímetros en una sola sesión. Reduce volumen, refirma y elimina la celulitis. Sus resultados son tan evidentes que ya se ha convertido en uno de los tratamientos más novedosos y eficaces del sector.

Si estás interesado en probar este revolucionario tratamiento para reducir volumen de manera efectiva, no dudes en llamar al Instituto de Belleza Patricia Moreno.

Inicio / Belleza / Tratamientos / Cyclone: 5 tecnologías para un cuerpo 10



Cyclone: 5 tecnologías para un cuerpo 10

108 compartidos



Publicado por Miriam Aguilar
Publicado en 24 de abril de 2015



En nuestra batalla contra la celulitis hemos probado prácticamente de todo. Cavitación, ultrasonido, LPG, radiofrecuencia... Te suenan todos estos nombres, ¿verdad? ¿Y si te dijéramos que existe un tratamiento que aúna 5 de estas tecnologías en un mismo equipo? Pues así es. Se llama Cyclone y está preparado para dejarnos un cuerpo estupendo de una vez por todas.

Cyclone Valencia: La alternativa a la cirugía estética

06/09/14 ESPAÑA, IRENA ADRIÁ /

Cyclone ya está en Valencia, considerado como la revolución en el mundo de la estética. Se trata de una nueva y sofisticada máquina, importada desde Londres, que ayuda a reducir el volumen del cuerpo en tan sólo 10 sesiones.



Carla Cervino durante una sesión con Cyclone en Urbao Pilates Valencia

Cyclone reduce la grasa corporal mejorando la silueta gracias a la unión de diferentes técnicas: HIFU, Radiofrecuencia Bipolar y Sistema CRS. Son muy pocos los Cyclone que existen en España y sólo tres trabajan actualmente en la Comunidad Valenciana, desde Urban Pilates Valencia ofrece este servicio a sus pacientes. Cyclone es ideal para combatir la cavitación y radiofrecuencia monopolar, así se consigue potenciar sus resultados. Son muchos los expertos que no han dudado en calificarlo como la alternativa a la cirugía estética, ya que consigue muy buenos resultados de una manera rápida e invasiva. Cada sesión de Cyclone dura 60 minutos, durante este tiempo el paciente se somete a tres tratamientos distintos.

40 ANIVERSARIO 1975-2015
MY Maribel Yébenes

INFORMACIÓN

CONTACTA

P. de la Habana 14
Tel.: 914 117 404

TRATAMIENTOS

- Facial
- Corporal
- Hombros
- Botas
- Embarazadas

03 CYCLONE PREMIUM

Remodelación corporal global contra la grasa, celulitis y flacidez

Jamás se había unido una tecnología tan potente y eficaz como se ha hecho con Cyclone Premium. Este tratamiento que el Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes realiza es capaz de atacar a los problemas estéticos que más nos preocupan: **grasa, celulitis y flacidez.**

Se logra una auténtica remodelación corporal gracias a la combinación de 5 tecnologías mejoradas y más precisas que nunca. De ahí su nombre, Premium.

Lo destacado de ello, es que estas 5 tecnologías se adaptan a cada paciente, de manera que se realiza un **tratamiento totalmente personalizado.** Si tu problema es la **grasa, celulitis y/o flacidez** y necesitas una solución rápida, ya que de cara al verano todos tenemos cierta urgencia en conseguir resultados inmediatos, este es el **tratamiento definitivo.**

Tal es la eficacia de la aparatología empleada, que desde que empezó en el mercado ha

Buscar en Maribel Yébenes

Linea de productos para el cuidado facial

Tratamiento Cyclone en Model Art, la vanguardia en estética facial y corporal

MODELART Nanni Dracero hace 6 meses 6 días | Votos: 916



Desde que en 1984 surgiera la primera máquina de LPG para moldear la figura, no han parado de producirse constantes y revolucionarios avances en los diferentes procesos y tecnologías en medicina estética. El I+D se ha convertido en la piedra angular en este sector. Entre estas nuevas propuestas la más novedosa y completa es sin duda el método **Cyclone, un tratamiento facial y corporal que**

cuenta con la ventaja de emplear cinco tecnologías que se complementan entre sí.

ModelArt, apuesta por la innovación poniendo a disposición de sus clientes el equipo Cyclone, exclusivo en Andalucía y el más demandado en los últimos años tanto por su eficacia, seguridad y potencia para obtener los mejores resultados.

Los especialistas lo recomiendan especialmente para pacientes que deseen reducir volumen en zonas localizadas y actuar en diferentes tipos de celulitis como la blanda, dura, edematosa o fibrosa localizada. Además entre sus indicaciones hay que añadir ventajas como que evita la flacidez y drena los líquidos y toxinas resultantes de la destrucción de grasa.



ModelArt

Centro Médico Avanzado

Avenida del Delta, 30 (Pasaje comercial)

Tel.: 958 266 880

www.modelart.es

EXPERTOS EN MEDICINA ESTÉTICA

EME

Portada | Ciencia y Opinión | **Novedades** | Noticias | Entrevistas | Expertos

Anterior | Siguiente >

Buscar...

Lipoescultura sin cirugía? Si en Clínicas Dorsia con Cyclone 5



Lucha contra la flacidez, la celulitis y la grasa con resultados desde la primera sesión

Te quedan unas semanas para las vacaciones y, aunque muchos ya dan por finalizada la Operación Bikini, la lucha contra la flacidez y la celulitis se te está haciendo muy cuesta arriba. Sesiones intermitentes de gimnasio, seguidos de sesiones de encolada y fruta no terminan de ofrecerte los ansiados resultados.

A la liposucción tradicional llegas ya un poco tarde. En los meses de calor, esta intervención invasiva se realiza menos por lo penoso de su postoperatorio. Tras la liposucción de la grasa, la paciente debe llevar durante el tiempo indicado por el cirujano una venda compresiva en la zona intervenida, ya sea vientro o glúteos, las más solicitadas. Además, es preciso entrenar las precauciones para que el sol no afecte a nuestras cicatrices o morados.

¿Quieres saberlo?

nueva App
Expertos en Medicina Estética

Descarga la nueva aplicación de EME y disfruta desde ya de todos nuestros contenidos, con información exclusiva sólo para nuestra app.



martes, 19 de marzo de 2013

MI PROTOCOLO CYCLONE PERSONALIZADO EN FELICIDAD CARRERA

Hace unas semanas que el gabinete de comunicación de FELICIDAD CARRERA se puso en contacto conmigo para ofrecerse a personalizar un protocolo a mi medida sobre aquellos aspectos que me gustaría mejorar físicamente. ¡Una idea fantástica!

Y todo un lujo, dicho sea de paso, porque conozco bien la gran profesionalidad de FELICIDAD CARRERA y de su hija LETICIA CARRERA desde hace un montón de años, y desde el principio sabía que estaba en las mejores manos. Ellos forman un equipo de excepción, dos auténticos Nº 1 en el sector de la estética y en sus centros se realiza una amplísima gama de tratamientos faciales y corporales con las más prestigiosas firmas de aparatología y cosmética.

TODOS LOS PROTOCOLOS DE FELICIDAD CARRERA SON PERSONALIZADOS

Si me dan a elegir, elijo siempre TRATAMIENTOS CORPORALES. Especialmente, pensando que el buen tiempo está a la vuelta de la esquina y yo no soy para nada de "dietas relámpago" ni "operaciones bikini" varias. A mí me gusta comer sano y si me pongo a dieta, me lo tomo con dieta calma, pero soy rigurosa. Nada de "efecto yo-yo".

Esto fue lo que le dije a FELICIDAD y, después de la consulta con ella, me recomendó el protocolo CYCLONE; y LETICIA, que es licenciada en Farmacia y Nutricionista, me puso la dieta. Mi primera cita fue hace casi 15 días en el centro de FELICIDAD CARRERA de la c/ Castelló, 67 (frente dos en Madrid). FELICIDAD me hizo un estudio para ver cuál era el protocolo corporal que mejor me podría ir para eliminar algunos kilos (4 en total) y mejorar mi aspecto físico.



TELVA

Consultorios • Foros • Concursos • Horóscopo • Newsletter

BELLEZA | MODA | PASARELAS | CELEBRITIES | NOVIAS | ESTILO DE VIDA | COCINA | NIÑOS | BLOGS | TV

Tendencias | Pelo | Maquillaje | Tratamientos | Trucos de Belleza | Dietas | Novias | Laboratorio de Belleza | Galerias

Cuerpazo exprés tras el embarazo

1 / 15

Ver miniaturas



Cyclone + entrenamiento personal
Leticia B. Carrera, de Felicidad Carrera nos asegura que las tops,

TRUCOS de BELLEZA

1. Crea un punzón para hacer nail art

2. ¿Cómo disimulo granitos rojos?

3. Evitar el efecto máscara con el maquillaje

TELVA
790 279 Me gusta

Me gusta esta página

Compartir

A un amigo le gusta esto



